

CLIPalgin



CLIPalgin alginato para impresiones dentales de altísima precisión y elasticidad, conforme con las normas ISO 1563, ADA 18.

Solo para uso dental profesional.

CARACTERISTICAS

Fast set.

Alta precisión y elasticidad.

La especial formula de CLIPalgin elimina la formación de polvo durante el uso.

Fácil remoción de la impresión sin deformaciones.

Optima compatibilidad con los yesos

Consistencia extra fina

Controla la salivación

Materiales completamente atóxicos

Exente de cadmio

Color verde. Aroma clorofila.

CLIPalgin es indicado para la toma de impresiones dentales de todos los tipos: elaboración de prótesis, modelos de ortodoncia, modelos de estudio, etc.

DATOS TECNICOS

Tiempo de mezclado*	30''
Tiempo de trabajo*	1'10''
Tiempo en la cavidad oral*	1'
Tiempo total *	2'10''
Recuperación elástica	99 %
Resistencia a la compresión (ISO 1563)	1,4 MPa
Permanent set (ISO 1563)	11,5%
Color	Verde
Aroma	Clorofila

* los tiempos reportados empiezan con la fase de mezclado del producto a una temperatura de 23 °C. (73°F.). Temperaturas superiores aceleran el proceso, mientras temperaturas inferiores aumentan los tiempos. Los tiempos de trabajo indicados son calculados usando agua destilada pero no se presentan cambios importantes si se utiliza agua corriente.

PREPARACION PARA EL USO

Con el fin de optimizar la utilización del producto, es aconsejable manipular repetidamente la bolsa antes de abrirla. Esta operación permite disolver los finos polvos que tienden a comprimirse durante el transporte y el almacenamiento, asegurando en esta manera un perfecto resultado en el uso del producto.

