

## PRESTIGE A PLUS LIGHT



Prestige A plus light - Polivinilsiloxano tixotrópico - Silicona por adición de altísima precisión estudiada expresamente para la toma de la segunda impresión dental. Relación ideal entre tiempo de trabajo y de endurecimiento, óptima precisión en la reproducción de los detalles, alta estabilidad dimensional.

Prestige A plus Light es apropiado para cualquier tipo de impresión: realización de prótesis fija, prótesis móvil, aparatos ortodónticos, provisionales, etc.

Exclusivamente para uso dental profesional.

### DATOS TECNICOS

ISO 4823 - ADA 19	Type 3 Light-Bodied Consistency
Relación de mezclado base-catalizador	1:1
Tiempo de trabajo *	2'
Permanencia en la cavidad oral *	3'30"
Tiempo de endurecimiento *	5'30"
Deformación a la compresión	3 - 5%
Recuperación elastica	>99.5%
Variación dimensional 24h	<0.20%
Dureza - Shore A	45
Color	Durazno

\*Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23° C/73°F. Temperaturas más altas aceleran el proceso y más bajas lo retardan.

### PREPARACIÓN PARA EL USO:

- Retirar la cremallera de la pistola hasta el inicio, levantando la palanca negra colocada bajo esta.
- Alzar el bloqueador del cartucho.
- Introducir el cartucho con la señal a "V" situada en la base de la misma, dirigida hacia abajo. El bloqueador del cartucho debe sucesivamente bajar fácilmente.
- Una vez colocado el cartucho en el dispenser, quitar la tapa con ¼ de vuelta y extraerlo con movimiento firme. Conservar la tapa.
- Asegurarse que los dos componentes (base y catalizador) salgan uniformemente presionando suavemente la palanca del dispenser y extruyendo una pequeña cantidad de Prestige A Plus Light. Limpiar cuidadosamente los orificios de salida del material.
- Introducir firmemente la punta mezcladora haciendo coincidir la "V" de la guía de color con la correspondiente del cartucho. Efectuar sucesivamente ¼ de vuelta presionando solamente la guía de color y no la punta mezcladora.
- Prestige A Plus Light ahora está listo para ser utilizado ejercitando una leve presión en la palanca del dispenser.

- Después del uso, retirar la punta mezcladora y colocar nuevamente la tapa, siguiendo las instrucciones descritas anteriormente.
- Para reemplazar el cartucho, seguir las indicaciones desde el 1° punto.
- Las impresiones tomadas con Prestige A Plus Light pueden ser plateadas o cobrizadas en baño galvánico.

#### IMPORTANTE

Antes de tomar la segunda impresión es importante lavar y secar perfectamente la primera impresión; esto garantiza la perfecta adhesión entre las dos impresiones.

#### DESINFECCION

Las impresiones pueden ser desinfectadas mediante inmersión en una solución de glutaraldeide al 2%, en una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% o en productos específicamente indicados, sin sufrir alteraciones.

#### VACIADO

Realizar el vaciado después de un tiempo mínimo de 1 hora después de la polimerización: La estabilidad dimensional se conservará por 7 días. Los productos de la línea Prestige son compatibles con los mejores yesos en el mercado (ej: Class III - Hydrocal Kerr®, Class IV - Fujirock GC®).

#### CONSERVACION

Las impresiones realizadas con Prestige A Plus Light, deben ser conservadas a temperatura ambiente. El producto está garantizado por 36 meses a partir de la fecha de producción si ha sido conservado correctamente y en lugar seco y fresco, lejano de fuentes de calor. La fecha de vencimiento reportada en la caja se refiere al producto sellado en producción antes de la apertura del empaque.

El número de lote y la fecha de vencimiento están indicados en cada empaque. En caso de señalación es importante citar las dos informaciones para individuar de manera correcta y rápida el lote indicado.

**IMPORTANTE:** No usar el producto después de su vencimiento.

#### ATENCION

- Evitar el contacto del catalizador con los ojos o la piel.
- En caso de contacto con la piel, lavar cuidadosamente el área con jabón y agua.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua y consultar un médico.
- Los elastómeros son químicamente resistentes; cualquier contacto con ropa, incluyendo batas de laboratorio debe ser evitado.

#### EMPAQUE

Código producto/ descripción	055108 - 100 ml (50 ml base + 50 ml catalizador) + 6 mixing tips
	055208 - 100 ml (50 ml base + 50 ml catalizador)
	055408 - 10 cartuchos x 50 ml (base + catalizador)

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) - ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : [info@vanninidental.com](mailto:info@vanninidental.com) [www.vanninidental.com](http://www.vanninidental.com)