

PRESTIGE MINI KIT



Kit que contiene el juego de siliconas por adición Prestige: Prestige Putty o Prestige Putty Soft+ Prestige Light + cucharas dosificadoras + puntas mezcladoras.

Producto especialmente estudiado para los estudiantes o como empaque de prueba.

Solo para uso dental profesional

Las siliconas Prestige pueden ser utilizadas con todos los tipos de cubetas, sin embargo en caso de pacientes edéntulos o parcialmente edéntulos, se recomienda el uso de Superform Tray System. En caso de utilización de cubetas no perforadas, usar Prestige Universal Adhesive.

DATOS TECNICOS

	Prestige Putty	Prestige Putty Soft	Prestige Light
ISO 4823 – ADA 19	Type 0 - Putty Consistency	Type 0 - Putty Consistency	Type 3 Light Bodied Consistency
Relación mezcla base:catalizador			1:1
Tiempo de mezcla *	30''	30''	Inmediato
Tiempo de trabajo *	2'	1'30''	2'
Permanencia en la cavidad oral *	3'30''	2'30''	1'30''
Tiempo de endurecimiento *	5'30''	4'00''	2'30''
Deformación a la compresión	2%	2%	2% -4%
Recuperación elástica	>99.5%	>99.5%	>99.5%
Variación dimensional 24 h	<0.2%	<0.2%	<0.2%
Dureza – Shore A	67	56	40
Color	Fuxia	Durazno	Azul

* Los tiempos reportados se basan en pruebas con una temperatura base del producto de 23° C. (73° F.). Temperaturas mas altas pueden acelerar el proceso de endurecimiento, mientras temperaturas inferiores aumentan el tiempo de endurecimiento

EMPAQUE

Prestige Mini Kit Putty (Cod. 055028)	Prestige Mini Kit Putty Soft (Cod. 055029)
<p>Contenido:</p> <p>100 ml Prestige Putty Base</p> <p>100 ml Prestige Putty Catalizador</p> <p>50 ml (base + catalizador) Prestige Light Fast set</p> <p>4 puntales mezcladores</p> <p>2 cucharas medidoras</p>	<p>Contenido:</p> <p>100 ml Prestige Putty Soft Base</p> <p>100 ml Prestige Putty Soft Catalizador</p> <p>50 ml (base + catalizador) Prestige Light Fast set</p> <p>4 puntales mezcladores</p> <p>2 cucharas medidoras</p>

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com