

PRESTIGE REGULAR



Prestige Regular polivinilsilossano tixotrópico - Silicona por adición de altísima precisión estudiada expresamente para la toma de la segunda impresión dental. Relación ideal entre tiempo de trabajo y de endurecimiento, alta precisión en la reproducción de los detalles, alta estabilidad dimensional.

Exclusivamente para uso profesional.

Prestige Regular es apropiado para cualquier tipo de impresión: realización de prótesis fija, prótesis móvil, aparatos ortodónticos, provisionales, etc.

DATOS TECNICOS

ISO 4823 - ADA 19	Type 2 Medium- Bodied Consistency
Relación de mezcla base:catalizador	1:1
Tiempo de mezcla *	Inmediato
Tiempo de trabajo*	2 min.
Tiempo de permanencia en la boca*	3 min. 30 seg.
Tiempo de endurecimiento*	5 min. 30 seg
Reproducción de los detalles (µm)	2 (µm)
Deformación a la compresión	2% -4%
Recuperación elástica	>99.5%
Variación dimensional 24h	<0.2%
Dureza - Shore A	45
Color	Amarillo

*Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23° C/73°F. Temperaturas más altas aceleran el proceso y más bajas lo retardan.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Retirar la cremallera del dispenser hasta el inicio, levantando la palanca negra colocada bajo ésta.
- Alzar el bloqueador del cartucho.
- Introducir el cartucho con la señal a “V” situada en la base de la misma, dirigida hacia abajo. El bloqueador del cartucho debe sucesivamente bajar fácilmente.
- Una vez colocado el cartucho en el dispenser, quitar la tapa con ¼ de vuelta y extraerlo con movimiento firme. Conservar la tapa.
- Asegurarse que los dos componentes (base y catalizador) salgan uniformemente presionando suavemente la palanca del dispenser y extruyendo una pequeña cantidad de Prestige Regular. Limpiar cuidadosamente los orificios de salida del material.
- Introducir firmemente la punta mezcladora haciendo coincidir la “V” de la guía de color con la correspondiente del cartucho. Efectuar sucesivamente ¼ de vuelta presionando solamente la guía de color y no la punta mezcladora.

- Prestige Regular ahora está listo para ser utilizado ejercitando una leve presión en la palanca del dispenser.
- Después del uso, retirar la punta mezcladora y colocar nuevamente la tapa, siguiendo las instrucciones descritas anteriormente.
- Para reemplazar el cartucho, seguir las indicaciones desde el 1º punto.
- Las impresiones tomadas con Prestige Regular pueden ser plateadas o cobrizadas en baño galvánico.

IMPORTANTE

Antes de tomar la segunda impresión es importante lavar y secar perfectamente la primera impresión; esto garantiza la perfecta adhesión entre las dos impresiones.

DESINFECCION

Las impresiones pueden ser desinfectadas mediante inmersión en una solución de glutaraldeide al 2%, en una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% o en productos específicamente indicados, sin sufrir alteraciones.

VACIADO

Realizar el vaciado después de un tiempo mínimo de 1 hora después de la polimerización: La estabilidad dimensional se conservará por 7 días. Los productos de la línea Prestige son compatibles con los mejores yesos en el mercado (ej: Class III - Hydrocal Kerr®, Class IV – Fujirock GC®).

CONSERVACION

Las impresiones realizadas con Prestige Regular, deben ser conservadas a temperatura ambiente. El producto está garantizado por 36 meses a partir de la fecha de producción si ha sido conservado correctamente y en lugar seco y fresco, lejano de fuentes de calor. La fecha de vencimiento reportada en la caja se refiere al producto sellado en producción antes de la apertura del empaque.

El número de lote y la fecha de vencimiento están indicados en cada empaque. En caso de señalación es importante citar estas dos informaciones para individuar de manera correcta y rápida el lote indicado.

IMPORTANTE: No usar el producto después de su vencimiento.

ATENCION

- Evitar el contacto del catalizador con los ojos o la piel.
- En caso de contacto con la piel, lavar cuidadosamente el área con jabón y agua.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua y consultar un médico.
- Los elastómeros son químicamente resistentes; evitar cualquier contacto con la ropa, incluyendo las batas de laboratorio.

EMPAQUE

Cod. Producto/ Descripción	0550105 - 100 ml (50 ml base + 50 ml catalizador) + 12 mixing tips
	0550205 - 100 ml (50 ml base + 50 ml catalizador)
	0550405 - 10 x 50 ml (base + catalizador)

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697
E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com