

# PROTESIL ELASTIC RAPID

Protesil Elastic Rapid alginato para impresiones dentales de altísima precisión y elasticidad, conforme con las normas ISO 1563, ADA 18.

Solo para uso dental profesional.



## CARACTERISTICAS

Fast set.

Altísima precisión y elasticidad.

La especial fórmula de Protesil Elastic Rapid elimina la formación de polvo durante el uso.

Fácil remoción de la impresión sin deformaciones.

Optima compatibilidad con los yesos

Consistencia extra fina

Controla la salivación

Materiales completamente atóxicos

Exente de cadmio

Protesil Elastic Rapid es indicado para la toma de impresiones dentales de todos los tipos, pero por su elasticidad y precisión es especialmente útil para impresiones en ortodoncia.

## DATOS TECNICOS

Tiempo de mezclado *	30''
Tiempo de trabajo *	1'10''
Permanencia en cavidad oral *	1'
Tiempo total*	2'10''
Recuperación elástica	99 %
Resistencia a la compresión(ISO 1563)	1,4 MPa
Permanent set (ISO 1563)	11,5%
Color	Rosado
Aroma	Fresa

\* Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23°C/73°F. Temperaturas superiores los aceleran y temperaturas más bajas los retardan.

## PREPARACIÓN PARA EL USO

Con el fin de optimizar la utilización del producto, es aconsejable manipular repetidamente la bolsa antes de abrirla. Esta operación permite disolver los finos polvos que tienden a comprimirse durante el transporte y el almacenamiento, asegurando en esta manera un perfecto resultado en el uso del producto.

