

PROTESIL NORMAL RIGID



Protesil Normal Rigid, alginato para impresiones dentales para trabajos de alta precisión. Protesil Normal Rigid es específicamente indicado para la toma de impresiones dentales en el curso de elaboración de prótesis fija y en la Técnica Schreinmaker®.

El producto es conforme a las Normas ISO 1563, ADA 18.

Solo para uso dental profesional.

CARACTERISTICAS:

Elimina la formación de polvo durante el uso.

Fácil remoción de la impresión sin deformaciones.

Optima compatibilidad con los yesos

Consistencia extra fina

Controla la salivación

Materiales completamente atóxicos

Exente de cadmio

DATOS TECNICOS

Tiempo de mezclado* -	40''
Tiempo de trabajo*	1'20''
Permanencia en la cavidad oral*	1'30''
Tiempo total*	2'50''
Recuperación elástica	99 %
Resistencia a la compresión (ISO 1563)	1,4 MPa
Permanent set (ISO 1563)	11,5%
Color	Azul
Aroma	Clorofila

* Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23°C/73°F. Temperaturas superiores los aceleran y temperaturas más bajas los retardan.

PREPARACION PARA EL USO

Con el fin de optimizar la utilización del producto, es aconsejable manipular repetidamente la bolsa antes de abrirla. Esta operación permite disolver los finos polvos que tienden a comprimirse durante el transporte y el almacenamiento, asegurando en esta manera un perfecto resultado en el uso del producto.

MEZCLADO

Mezclar vigorosamente en un recipiente adecuado el polvo con agua a una temperatura media de 23° C.

Impresión de una sección: Una medida (10 gr) de polvo + Una medida (21 ml) de agua

Impresión de una arcada: Dos medidas (20 gr) de polvo + Dos medidas (42 ml) de agua

Para impresiones grandes, las dosis pueden ser aumentadas, respetando siempre las proporciones indicadas.

Atención: la medida de polvo debe ser llenada a ras, sin comprimir el polvo. Una mezcla más o menos densa se puede obtener variando ligeramente la cantidad de agua empleada.

Mezclado con medios mecánicos: el tiempo de mezclado y endurecimiento se reduce con el uso de aparatos mecánicos. Es aconsejable seguir los tiempos indicados por el fabricante del aparato, que de todas formas es alrededor de 9/10 segundos.

TOMA DE LA IMPRESION

Solicitar al paciente enjuagar la boca con agua tibia; colocar la cubeta con el material en la cavidad oral practicando una leve presión durante un minuto y 30 segundos, tiempo necesario para el endurecimiento del producto. Por lo tanto, se aconseja respetar el tiempo indicado con el fin de lograr una impresión perfecta y evitar distorsiones. Quitar con cuidado la impresión de la boca y lavarla con agua corriente a una temperatura aproximada de 20 °C.

COLADO

Se aconseja el colado inmediato del modelo. De todas formas, si esto no fuera posible, es importante conservar la impresión dentro de una bolsa plástica sellada, envuelta en una servilleta o algodón húmedo, con el fin de evitar variaciones dimensionales. En estas condiciones, Protesil Normal Rigid mantiene sus características por tiempo considerable. De todas formas, es más aconsejable colar el modelo en un período de 48 horas desde la toma de la impresión. Protesil Normal Rigid es compatible con los mejores yesos dentales.

CONSERVACIÓN

El producto debe ser conservado herméticamente cerrado en lugar fresco y seco (5-27°C/41-80°F).

La fecha de vencimiento escrita en el empaque, se refiere al producto íntegro y sellado en producción .

El número de lote y fecha de vencimiento son especificados en cada empaque del producto. En caso de reclamos, es importante señalar estos dos datos con el fin de localizar correcta y velozmente el lote señalado.

IMPORTANTE: no usar el producto después de la fecha de vencimiento.

EMPAQUE

Código Producto / Descripción

005006 - Cartón con 12 bolsas de 500 g

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com