

## **PRESTIGE UNIVERSAL ADHESIVE**



Adhesivo Universal específicamente indicado para garantizar la adecuada adhesión entre los materiales de impresión PROTESIL – PRESTIGE y los diferentes tipos de cubetas.

Solo para uso dental profesional.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de aplicar el adhesivo es importante asegurarse que la superficie de la cubeta esté perfectamente limpia y seca.

Aplicar en la superficie interna de la cubeta una capa delgada de Prestige Universal Adhesive.

Dejar secar aproximadamente 2 minutos para lograr la perfecta adhesión del adhesivo con el material de impresión.

Aplicar la silicona.

### **ADVERTENCIAS**

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto accidental enjuagar abundantemente con agua corriente.

Evitar la inhalación de los vapores y conservar lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.

Cerrar cuidadosamente el frasco después del uso.

Evitar el contacto con la ropa y superficies plásticas pues su limpieza puede ser difícil.

Conservar a temperatura inferior a 25° C/80°F

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

### **PRECAUCIONES**

R11: Fácilmente inflamable

R20/21: Nocivo por inhalación y contacto con la piel

R38: Irritante para la piel

S2: Conservar fuera del alcance de de los niños

S9: Conservar el recipiente en lugar ventilado

S13: Mantener lejos de alimentos y bebidas, incluyendo los de animales.

S16: Conservar lejos de llamas y chispas - No fumar

S46: En caso de de ingestión contactar inmediatamente el médico y mostrarle el envase o la etiqueta

S36-37 Usar prendas y guantes protectores

### **EMPAQUE**

Cod. Producto/ descripción                      058005    Botella de 10 ml.

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : [info@vanninidental.com](mailto:info@vanninidental.com) [www.vanninidental.com](http://www.vanninidental.com)